

# Родовая кровать Optima. Описание.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: [maa@nt-rt.ru](mailto:maa@nt-rt.ru)

[www.merivaara.nt-rt.ru](http://www.merivaara.nt-rt.ru)

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69

# OPTIMA™

Акушерское кресло-кровать

Более комфортные роды

РОДДОМ



## Более комфортные роды



Рождение ребенка — это потрясающее событие, которое родители запомнят на всю жизнь. Однако оно требует большого эмоционального, а также физического напряжения. Именно поэтому обеспечение комфорта матери и новорожденного на всем протяжении пребывания в родильном доме исключительно важно.

Для того чтобы это событие протекало в максимально спокойной и удобной обстановке, но без ущерба для здоровья и безопасности, компания Merivaara производит широкий спектр эргономичного оборудования и мебели для родильных отделений: столы и светильники для дородового наблюдения, акушерские кресла-кровати, а также кроватки для новорожденных и больничные кровати для послеродового ухода. Кроме того, мы можем предложить различные решения для операционных родильных и других больничных отделений.

«Мы испытали новую модель Optima и высоко оценили ее новые эргономичные функции, такие как удобная ножная секция и разнообразные положения регулировки для комфортных родов. Мобильность и простота использования также способствуют максимальной безопасности пациентки».  
Родильный дом клиники медицинского округа Хельсинки и Уусимаа, Хельсинки, Финляндия

## Три модели кроватей Optima

Линейка акушерских кресел-кроватей Optima предлагает более комфортные условия для рожениц на всех этапах родов. Возможность выбора нескольких положений, эргономичные функции и устойчивая, надежная конструкция обеспечивают оптимальный комфорт для матери, новорожденного и акушерки. Родильным отделениям предлагается на выбор три модели кресла-кровати Optima, что позволяет выбрать наиболее подходящие модели в соответствии с потребностями и условиями работы.



## Во время родов

Акушерское кресло-кровать Optima обеспечивает эргономичность, мобильность и безопасность

Усовершенствованное кресло-кровать Optima разработано с учетом потребностей и удобства роженицы, акушерки и врача. Нашими приоритетами при проектировании были эргономичность, безопасность и мобильность, которые позволяют создать комфортную обстановку как для семьи, так и для медицинского персонала.



- Предназначается для всех периодов родов, включая ситуации, когда необходимо особое участие медицинского персонала.
- Одно изделие позволяет принять множество положений во время родов, обеспечивая более высокий уровень удобства для матери.
- Свободный доступ акушерки к матери из различных положений способствует повышению уровня эргономики и безопасности.
- Электрические или ручные регулировки Тренделенбург, а также рукоятка быстрого опускания спинной секции для максимальной безопасности.
- Может использоваться для перевозки пациентки внутри больницы.
- Низкое опускание ложа позволяет пациентке легко лечь и встать с кресла-кровати.

Более подробную информацию о решениях Merivaara для родильных отделений, операционных залов и больничных палат вы можете получить, посетив наш сайт [www.merivaara.com](http://www.merivaara.com).

## Для дородового наблюдения

### Стол и светильники для осмотра

Стол для осмотра Merivaara специально предназначены для гинекологического осмотра и малых операций. Эти компактные столы с электрическими или ручными регулировками сочетают эргономику с функциональным дизайном и простотой использования.

Серия светильников Merivaara для медицинского осмотра обеспечивает исключительную глубину освещения с равномерным, бестеневым световым потоком и фильтром ИК-излучения.



## Для послеродового ухода

### Первая кроватка ребенка

После родов новорожденный может быть помещен в кроватку, устанавливаемую рядом с матерью. Кроватка легко перемещается для удобства родителя или медицинского персонала. Для дополнительной безопасности кроватка оснащена регулировкой Тренделенбург и лотком для хранения.

Мы также предлагаем больничную мебель для палат послеродового ухода.





Опоры для колен и опорную дугу для роженицы можно прикрепить к тазовой секции с помощью уникального фиксирующего механизма или к спинной секции при помощи вставной системы, что обеспечивает большую свободу при изменении положения.



Боковые ограждения усовершенствованной конструкции, более стильные и гигиеничные.



Объемное подкладное судно из нержавеющей стали можно задвинуть под ножную секцию и при необходимости выдвинуть.



Ультралегкая, но устойчивая ножная секция легко выдвигается и задвигается под кровать вместе с матрасом, что обеспечивает быстроту и эргономику действий персонала. Ножная секция с регулировкой высоты также способна выдерживать большую нагрузку — максимальная безопасная рабочая нагрузка составляет 150 кг.

## Модель Optima с 4-мя электроприводами

Кресло-кровать Optima с 4-мя электроприводами является самой передовой моделью с несколькими электрическими регулировками и функциями для обеспечения безопасности. Данная модель оснащена ножной секцией с регулируемой высотой и наклоном. Эти функции обеспечивают расширенные возможности использования различных

положений во время родов. Например, регулируемая по высоте ножная секция позволяет роженице принимать положение сидя, а также предлагает возможность использования ножной секции в качестве опоры для ног матери во время потужного периода. Использование наклона ножной секции позволяет добиться еще большей эффективности.

### Функции

#### Электрические регулировки

- Регулировка высоты
- Регулировка спинной секции
- Регулировка высоты ножной секции
- Тренделенбург

#### Ручные регулировки

- Выдвижение/втягивание ножной секции
- Наклон ножной секции

#### Дополнительные функции обеспечения безопасности

- Ручная регулировка Тренделенбург
- Быстрое опускание спинной секции вручную



Наклон ножной секции расширяет варианты положений.



Электрические и ручные регулировки Тренделенбург повышают уровень безопасности пациента.

## Модель Optima с 2-мя электроприводами

Кресло-кровать Optima с 2-мя электроприводами практически не отличается от модели Optima с 4-мя электроприводами, только регулировки положения Тренделенбург и ножной секции производятся вручную. Ножная секция задвигается под тазовую секцию и выдвигается из-под нее вручную, но ее высота и наклон не регулируются. Тем не менее, все остальные эргономичные регулировки и функции для обеспечения безопасности полностью соответствуют Optima с 4-мя электроприводами.



### Функции

#### Электрические регулировки

- Регулировка высоты
- Регулировка спинной секции

#### Ручные регулировки

- Выдвижение/втягивание ножной секции
- Тренделенбург
- Быстрое опускание спинной секции

## Optima с гидроприводом

Модель Optima с гидроприводом предназначена для оптимального использования изделия в любых условиях, даже в случае сбоев в энергоснабжении. Все регулировки данной модели производятся

вручную. Высота кровати регулируется гидравлической педалью, а регулировки спинной секции производятся при помощи газовой пружины. Ножная секция выдвигается и задвигается вручную, как и в других моделях Optima.



### Функции

#### Ручные регулировки

- Спинная секция (с помощью газовых пружин)
- Высота (гидравлическая педаль)
- Тренделенбург
- Выдвижение/втягивание ножной секции

## Большое количество положений при использовании одного изделия обеспечивает максимальное удобство

### Сидячее положение

#### Преимущества

- Эффективное удобное положение для потуг
- Способствует более легкому течению родов за счет силы притяжения и раскрытия таза

#### Optima предлагает

- Широкие опоры для ног
- Поручни для более эффективных потуг
- Широкий диапазон регулировок ножной секции для облегчения родов и обеспечения удобного положения акушерки



### Вертикальная позиция с опорой на дугу для роженицы

#### Преимущества

- Способствует более легкому течению родов за счет силы притяжения и раскрытия таза
- Расслабление тазовой области облегчает процесс родов для матери
- Также может использоваться в сочетании с гимнастическим мячом

#### Optima предлагает

- Дуга для роженицы для опоры на руки
- Выдвижная ножная секция, обеспечивающая дополнительное пространство
- Дуга для роженицы также может использоваться в положении стоя

## Положение на боку

### Преимущества

- Позволяет расслабиться между схватками и потугами
- Сокращает давление в перинеальной области и увеличивает приток крови в зону нахождения плода
- Эргономичное положение для женщин любого роста и веса

### Optima предлагает

- Широкий диапазон регулировки опоры для ног
- Запатентованный удобный механизм фиксирующих защелок



## Положение на корточках и на коленях

### Преимущества

- Снижает давление на диафрагму и улучшает кровоснабжение сокращающихся мышц
- Позволяет легко найти удобное положение таза

### Optima предлагает

- Широкий диапазон регулировок тазовой и спинной секций
- Задвигающаяся ножная секция создает дополнительное свободное пространство возле пациентки и кровати

Положения, показанные на иллюстрациях, демонстрируют возможности модели Optima с 4-мя электроприводами и регулируемой по высоте ножной секцией. Аналогичные положения возможны для моделей с 2-мя электроприводами и гидроприводом при использовании дополнительных принадлежностей и/или других регулировок кровати.

Более подробную информацию о других положениях можно найти, посетив наш сайт [www.merivaara.com](http://www.merivaara.com)

## Сравнительный обзор трех моделей Optima



**С 4-МЯ ЭЛЕКТРО-ПРИВОДАМИ**



**С 2-МЯ ЭЛЕКТРО-ПРИВОДАМИ**



**С ГИДРО-ПРИВОДОМ**

Функции	<p><b>Электрические регулировки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высота</li> <li>• Спинная секция</li> <li>• Высота ножной секции</li> <li>• Тренделенбург</li> </ul> <p><b>Ручные регулировки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выдвижение/втягивание ножной секции</li> <li>• Наклон ножной секции</li> </ul> <p><b>Дополнительная безопасность</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ручная регулировка Тренделенбург</li> <li>• Быстрое опускание спинной секции вручную</li> </ul>	<p><b>Электрические регулировки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высота</li> <li>• Спинная секция</li> </ul> <p><b>Ручные регулировки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выдвижение/втягивание ножной секции</li> <li>• Тренделенбург</li> </ul> <p><b>Дополнительная безопасность</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Быстрое опускание спинной секции вручную</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Высота</li> <li>• Спинная секция</li> <li>• Выдвижение/втягивание ножной секции</li> <li>• Тренделенбург</li> </ul>
---------	---	---	--

### Технические характеристики

Матрачное основание	3-х секционное	3-х секционное	3-х секционное
Безопасная рабочая нагрузка	230 кг	230 кг	230 кг
Макс. допустимый вес пациента	190 кг	190 кг	190 кг
Масса	165 кг	118 кг	114 кг
Тренделенбург	12°	12°	12°
Регулировка угла спинной секции	78°	70°	60°
Регулировка угла ножной секции	16°	-	-
Высота, мин. – макс.	580–955 мм	590–955 мм	570–935 мм
Ширина кровати	1000 мм	1030 мм	1030 мм
Ширина матрасного основания	780 мм	780 мм	780 мм
Длина кровати, мин. – макс.	1650–2210 мм	1520–2110 мм	1520–2110 мм
Длина матрасного основания, мин. – макс.	1300–1900 мм	1320–2010 мм	1320–2010 мм
Регулировка высоты ножной секции	0–250 мм (расстояние между ножной и тазовой секциями)	-	-

- Акушерские кресла-кроватьи Optima соответствуют последним директивам и стандартам для медицинского оборудования: МЭК/EN 60601-1-2 (ЭМС), МЭК/EN 60601-1, МЭК/EN 60601-2-52.
- Продукция Merivaara проектируется и производится в соответствии со стандартами системы управления качеством ISO 9001:2008 и ISO 13485:2003 и системы защиты окружающей среды ISO 14001:2004.



## Принадлежности для всех моделей



**Опоры для колен, пара**  
A42462200



**Опоры для ног**  
A42559000



**Инфузионная стойка с 4-мя крючками** 100000499



**Устройство для приподнятия пациента**  
A41884100



**Опорная дуга для роженицы**  
A42749500



**Боковые ограждения**  
A42200100 модель с 4-мя электроприводами  
A42801000 модели с 2-мя электроприводами и гидроприводом



**Боковые ограждения**  
A42718200 модель с 4-мя электроприводами  
A42750700 модели с 2-мя электроприводами и гидроприводом



**Опора для рук**  
100000127  
только для модели с 4-мя электроприводами



**Торец кровати, откидывающийся**  
A41935200 модель с 4-мя электроприводами  
A41982900 модели с 2-мя электроприводами и гидроприводом



**Торец кровати**  
100009890 модель с 4 электроприводами  
100009990 модели с 2-мя электроприводами и гидроприводом



**Подставка для монитора**  
128009769



**Рельс для крепления принадлежностей**  
100000701 только для модели с 4-мя электроприводами



**Корзина для комплектов матрасов**  
10003974



**Корзина для журналов**  
128009784



**Крюк для электрокабеля**  
A41987307



**Ножная педаль**  
A42471800  
для модели с 4-мя электроприводами



**Панель управления для пациента, лампа для чтения и подсветка низа кровати (модель с 4-мя электроприводами)** A42969100  
**Пульт управления для пациента и подсветка низа кровати (модель с 4-мя электроприводами)**  
A43192000 (без лампы для чтения)




**Пульт управления для персонала АСО**  
Предназначается для медсестер, позволяет заблокировать электрические регулировки, располагается у изголовья или на боковых ограждениях. Для модели с 4-мя электроприводами.




**Ножная педаль**  
A42965600 для модели с 2-мя электроприводами



**Панель управления для пациента, лампа для чтения и подсветка низа кровати (модель с 2-мя электроприводами)**  
A42964800

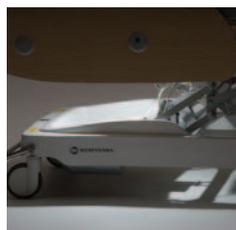

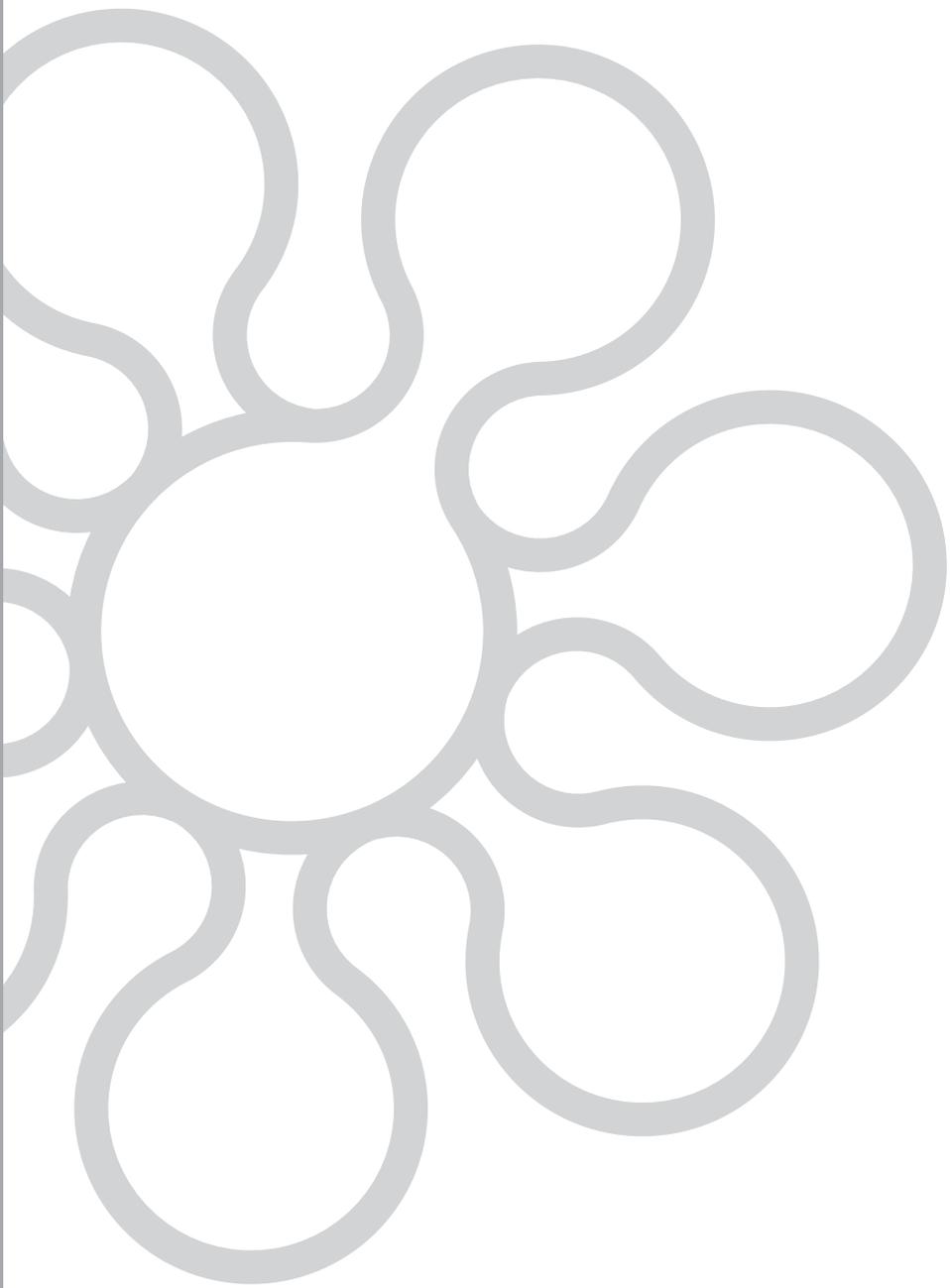

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: [maa@nt-rt.ru](mailto:maa@nt-rt.ru)

[www.merivaara.nt-rt.ru](http://www.merivaara.nt-rt.ru)

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69